

機械器具 80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器

一般の名称：非能動型接触鍼

JMDN コード：70613001

ひ鍼

単回使用

【禁忌・禁止】


- ・ 再使用禁止
- ・ 目、手の平、足の裏、心臓の上には使用しないこと。
- ・ 傷、湿疹等の部分には使用しないこと。
- ・ アレルギー体質の方には使用しないこと。

【操作方法又は使用方法等】

1. 包装から本品を取り出す。
2. 本品を1個ずつシールから剥がして、鍼灸療法にしたがって処置を行う。
3. 処置後、廃棄する。

【形状・構造及び原理等】

1. 外形図（皮内針、絆創膏）

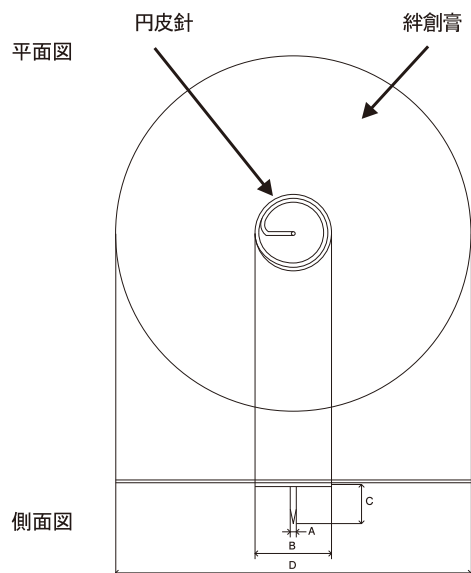

【使用上の注意】

1. 首、肩、腰等コリのある所、痛いところに貼ること。
2. 皮膚に直角に正しく貼ること。針が斜めになったり、浮いていると痛みを感じることもある。
3. 入浴時には、貼った箇所を強くこすらないこと。
4. 目や手の平、足の裏、心臓の上には使用しないこと。
5. 3～4日毎に貼りかえること。使用時には消毒用アルコール等で皮膚を拭いておくこと。
6. 一ヶ所に10針以上貼らないこと。
7. 傷、湿疹等の部分には使用しないこと。
8. アレルギー体質の方には使用しないこと。
9. かゆみ、カブレ等が生じた場合は、早めに取り除くこと。
10. 幼児の手の届かない場所に保管すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・ 直射日光の当たらない場所で保管する。

【包装】

ひ鍼 24 針/1袋、15針/1袋、6 針/1袋、2 針/1袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：日本薬興株式会社
東京都中央区東日本橋三丁目2番4号

製造元：広州花山医用塑料廠（中華人民共和国）

番号	名称	箇所	寸法 (mm)
①	円皮針	A. 針径	0.22
		B. リング径	2.8
		C. 針長	1.3
②	絆創膏	D. 直径	13

2. 原材料

円皮針：ステンレス
絆創膏：粘着剤（日本薬局方） 通気孔 有
剥離紙：紙

【使用目的、効能又は効果】

外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する非能動型器具である。